



OXALVAP

(Odpářovač kyseliny šťavelové)

NÁVOD K POUŽITÍ



Ing. Aleš Oharek
Špitálská 738
684 01 Slavkov u Brna
Česká republika



+420 776 181 982
+420 606 689 367



www.oharkovi.cz



info@oharkovi.cz

Co budete potřebovat

- Odpařovač OXALVAP
- Zdroj elektrické energie (auto baterii 12 voltů)
- Krystaly kyseliny šťavelové
- Odměrku na krystaly (součástí balení)
- Elektronický časovač nebo stopky
- Ochranu očí (uzavřené ochranné brýle)
- Masku s respirátorem schválenou proti výparům kyseliny (například 3M OV/N95)
- Rukavice odolné kyselině šťavelové
- Ucpávky vchodu

Bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte masku, ochranu očí a rukavice
- Vyhněte se kontaktu pokožky s krystaly, můžou způsobit popáleniny
- Více informací na bezpečnostním listu kyseliny šťavelové

Návod k obsluze

1. Přidejte 1 gram kyseliny šťavelové na jeden nástavek 39x24 cm.
2. Například včelstvo se dvěma nástavky potřebuje 2 gramy pro ošetření.
3. Vložte odpařovač OXALVAP do úlu, a to buď pod síto na podložku nebo přes vletový vchod.
4. Ucpěte zbylé otvory (vchod , očka atd..)
5. Připojte odpařovač Oxalvap ke zdroji elektrické energie (autobaterii 12 voltů) na dobu 120 -150 sekund (maximálně 180 sekund - závisí na kapacitě baterie).
6. Odpojte OXALVAP od zdroje napájení.
7. Vyčkejte 3-5 minut.
8. Po splnění předcházejícího bodu odstraňte všechny ucpávky a vyjměte odpařovač.
9. Zkontrolujte, zda je odpařovač chladný před opětovným použitím nebo uschováním.

Podmínky aplikace

- Léčení provádějte za bezvětří při okolní teplotě nad 5 °C.
- Pro lepší kontakt včel létavek s látkou aplikujte navečer.
- Aplikovat lze pouze v mezisnúžkovém období nebo v případě oddělků a rojů, z nichž se nebudou odebírat medné plástve.
- Aplikace nepůsobí pod zavíčkovaný plod.
- Po 7 – 10 dnech zopakujte celý proces alespoň 3x.
- Proceduru opakujte po dobu tří týdnů, protože výpary kyseliny nemají vliv na roztoče v plodových buňkách.
- Druhý den po ošetření spočítejte počet roztočů na podložce úlu. Roztoči padají po aplikaci další 2-3 týdny.
- Jarní přeléčení lze provést až po prvním proletu včel.
- Další aplikace je doporučena v období května až června.
- Podzimní přeléčení lze provést až v bezplodovém období v měsíci listopad až prosinec, kdy stačí pouze jedna aplikace kyseliny šťavelové.

- Léčbu je vhodné kombinovat s odparem kyseliny mravenčí pomocí zařízení k tomu určených.

Pozn. Při nižší okolní teplotě, například v podzimním období, jsou výpary více viditelné.

Technické parametry

- ROZMĚRY (DxVxŠ) : 45cm x 1,2cm x 6cm
- VÁHA : 250 g
- ZDROJ ENERGIE : autobaterie 12 V
- MATERIÁL : nerez, plast

Obsah balení

- Odpařovač – OXALVAP + rukojeť
- Odměrka na kyselinu
- Návod k použití

Poznámky

